

FN Ostrava	Příručka pro odběr vzorků Virologická laboratoř	Strana: 1/1
-		Revize: 01

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍHO VZORKU Virologická laboratoř

1 Požadavky na odběry

Odběr by se měl provádět nejlépe ráno nalačno za aseptických podmínek. Krev se odebírá do zkumavek na jedno použití, krev by neměla být hemolyzovaná nebo chylózní.

1.1 *Vyšetření anti-HCV, HBsAg, HIV Ag/Ab (pouze pro ambulanci KC)*

Metoda: CMIA

Odběr vzorku: nesrážlivá krev (EDTA), minimální objem **7 ml**, děti adekvátně menší objem - minimálně **2–3 ml**

Každá zkumavka musí být náležitě označena identifikačními údaji vyšetřované osoby.

2 Dodání vzorků

2.1 *Uchování a přeprava*

Vzorky nesrážlivé krve (EDTA) lze transportovat při pokojové teplotě 18-25°C, při doručení do 24 hod.. Pokud transport probíhá z objektivních důvodů déle než 24 hod. nebo za teploty vyšší než 25 °C, je nutné primární vzorky zaslat v chladícím boxu nebo v boxu s chladícími vložkami (doručit max. do 48 hod. od odběru).

Vzorky lze uchovávat max. 3 dny při 2-8°C před doručením.

Ke každému vzorku/-ům vyšetřované osoby je třeba dodat řádně vyplněnou žádanku, v níž musí být náležitě identifikován lékař indikující vyšetření, včetně adresy žadatele a jeho telefonního spojení, dále musí obsahovat jednoznačnou identifikaci vyšetřované osoby /pacienta, včetně čísla zdravotní pojišťovny, kódu diagnózy a údaj o datu a času odběru krevního vzorku.

Laboratoře KC přijímají primární vzorky správně odebrané, nepotřísněné, v nepoškozeném obalu označené identifikačními údaji vyšetřované osoby v souladu s údaji na správně vyplněné žádance.

3 Doba odezvy

Laboratoř má stanovený čas od příjmu vzorku do odeslání výsledku takto:

<i>Rutinní vyšetření</i>	4 dny
<i>Statimová vyšetření</i>	4 hod